

UITLEG NIEUWE NUTRICIA POMPSETS / TRANSITIESETS MET ENFIT AANSLUITING

Pompslang:



aansluiting voor in voedingszak:



1) Voedingspoort heeft ENFit aansluiting



2) Bijspuitpunt heeft ENFit aansluiting



Er zijn nog geen PEG's, gastrotubes, buttons met ENFit aansluiting, dus om te kunnen voeden en/of medicatie toe te dienen zitten in de verpakking 2 adapters:

1) Adapter om ENLock aansluiting te maken tussen de ENLock aansluiting of de conische aansluiting van de sonde en de ENFit pompslang.

Met deze adapter zijn de volgende connecties te maken:

- 0321-serie en 0221-serie verlengslangen
- 0323-serie en 0223-serie verlengslangen
- 0327-serie verlengslangen
- 0110-serie en 0112-serie gastrotubes
- PEG's met conische aansluiting



2) Adapter om van het ENFit bijspuitpunt een Luerlock aansluiting te maken voor de sliptip spuit (voor medicatie)

Deze is af te sluiten met een ENFit afsluitdop (het kleine dopje op de foto).

