

BIP EvoCore®

Das Biopsiegerät der nächsten Generation.



BIP-EvoCore®

Wiederverwendbares Biopsiegerät zur histologischen Gewebeentnahme.

Das Biopsiegerät der 4. Generation zur histologischen Gewebeentnahme ist das Resultat der neuesten technologischen Entwicklung aus dem BIP Entwicklungszentrum – Made in Germany.

Vorteile auf einen Blick

Komplett einhandbedienbar

Hohe Geschwindigkeit

Statusfenster:
gespannt / ungespannt /
Entleerung

Neuartiger Deckelverschluss

Wahlweise Voll- und Halbaomatik

Verstellbare
Einschusstiefe
15 oder 22 mm

Sicherheitsbügel

Sichere, stabilere Führung
der Nadel

Nadelprotector

EvoCore®-Biopsiegerät
Bestellnummer: EC2215

Technische Daten:
Material: Edelstahl / Kunststoff
Gerätelänge: 115 mm
Gewicht: ca. 219 g

Verbesserte Handhabung:

Optimal positionierter Auslösemechanismus (mit integriertem Sicherheitsbügel) für wahlweise halbautomatische oder vollautomatische Biopsie.

Halbautomatischer Modus:

- Deutlich höhere Gewebeausbeute.
- Die geöffnete Gewebesammelkerbe (Notch) ermöglicht die exakte Positionierung und Dokumentation in der Läsion.
- Im schwierigen Umfeld ist eine Gewebeentnahme ohne Vorschuss möglich (z. B. Schilddrüse, Lymphknoten)

Hygiene:

- Einzigartiger Nadelprotector verhindert mögliche Kontamination zwischen Gerät und Biopsienadel.
- Patentierter Nadelschutz zum sterilen Einlegen der Biopsienadel in das Gerät.

Neue Biopsienadel:

Die Führungsschiene der EvoCore®-Biopsienadel erleichtert das Einlegen und sorgt für sicheren Halt im EvoCore®-Biopsiegerät.

Neuartiger Deckelverschluss:

Vorsehentliches Öffnen während des Biopsievorganges wird durch einen fest arretierten Deckelverschluss verhindert. Auf Knopfdruck öffnet sich der Deckel automatisch.

Automatische Sicherung:

Der integrierte Sicherheitsbügel gewährleistet maximale Sicherheit und erspart manuelles Entsichern.

Verstellbare Einschusstiefe:

Wahlweise kann eine Einschusstiefe von 15 mm oder 22 mm eingestellt werden, um die Gewebeentnahme für alle Weichteil-Biopsien zu optimieren.

Bedienung mit einer Hand:

Die leichte Spannbarkeit des Aufzughebels ermöglicht eine vollständige Einhandbedienung des Gerätes. Eine Arretier-Position erlaubt das Öffnen des Gewebefensters und somit die Gewebeentnahme, ohne die Nadel aus dem Biopsiegerät zu entnehmen.

Hohe Geschwindigkeit:

Das leistungsstarke Federsystem sorgt für eine schnelle Nadelbewegung. Somit werden ausgezeichnete Stanzbiopsieergebnisse erzielt. Selbst kleine und schwierige Läsionen werden präzise punktiert.



EvoCore®-Biopsienadel

Bestellnummern:


Ø Länge	100 mm	130 mm	160 mm	200 mm	Farb- kodierung
20G/0,95 mm	EC20100	EC20130	EC20160	EC20200	
18G/1,25 mm	EC18100	EC18130	EC18160	EC18200	
16G/1,65 mm	EC16100	EC16130	EC16160	EC16200	
14G/2,10 mm	EC14100	EC14130	EC14160	EC14200	
12G/2,76 mm	EC12100	EC12130	EC12160	EC12200	

Die EvoCore®-Biopsienadeln sind nach Durchmesser farbkodiert.

BIP-Koaxialkanüle für EvoCore®-Biopsienadel

Bestellnummern:

Koaxialkanüle Standardversion	Koaxialkanüle MR-kompatibel	Ø [G]	Ø [mm]	A [mm]	B [mm]	Kompatibel zu EvoCore®-Nadel
ECC12100	---	11	3,06	64,5	59	EC12100
ECC12130	---	11	3,06	94,5	89	EC12130
ECC12160	ECC12160MR	11	3,06	124,5	119	EC12160
---	ECC12200MR	11	3,06	164,5	159	EC12200
ECC14100	ECC14100MR	13	2,47	63,5	59	EC14100
ECC14130	ECC14130MR	13	2,47	93,5	89	EC14130
ECC14160	ECC14160MR	13	2,47	123,5	119	EC14160
---	ECC14200MR	13	2,47	163,5	159	EC14200
ECC16100	ECC16100MR	14	2,10	63,0	59	EC16100
ECC16130	ECC16130MR	14	2,10	93,0	89	EC16130
ECC16160	---	14	2,10	123,0	119	EC16160
---	ECC16200MR	14	2,10	163,0	159	EC16200
ECC18100	---	16	1,65	62,5	59	EC18100
ECC18130	---	16	1,65	92,5	89	EC18130
ECC18160	---	16	1,65	122,5	119	EC18160
---	ECC18200MR	16	1,65	162,5	159	EC18200
ECC20100	---	18	1,25	62,0	59	EC20100
ECC20130	---	18	1,25	92,0	89	EC20130
ECC20160	---	18	1,25	122,0	119	EC20160
ECC20200	---	18	1,25	162,0	159	EC20200
Material: Edelstahl/Kunststoff	Material: Titan/Kunststoff					

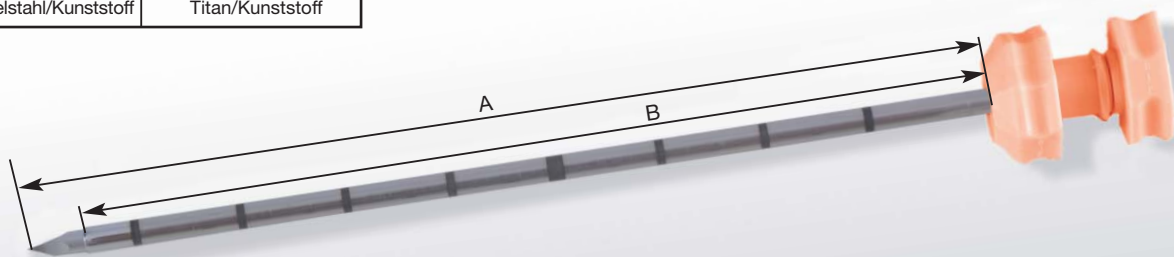

BIOMED. INSTRUMENTE & PRODUKTE GmbH

Am Brand 1
D-82299 Türkenfeld, Germany
Tel.: +49 (0)8193 9318-0
Fax: +49 (0)8193 6548
E-mail: info@bipmedical.com
www.bipmedical.com
www.biopsydevice.com
www.biopsiegeraete.de

Patents pending