





Jejunale voedingskatheters

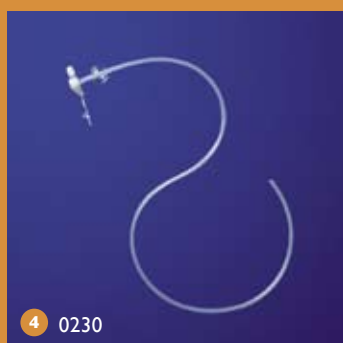

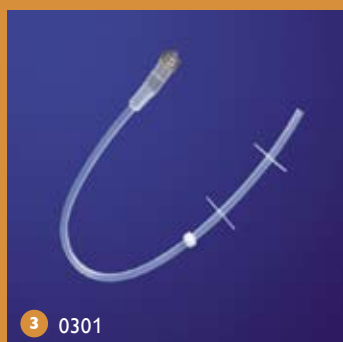

Jejunale voedingskatheters

Sommige patiënten, die enterale voeding nodig hebben, verdragen geen voedsel op de maag. Voor hen is een jejunale voedingskatheter een oplossing. Hiermee kan sondevoeding rechtstreeks op de dunne darm (het jejunum) worden toegediend. Cobra Medical heeft diverse jejunale voedingskatheters in haar assortiment.

Soorten jejunale voedingskatheters

Cobra Medical verkoopt vijf soorten jejunale voedingskatheters:

- 1 Cobra jejunale neussonde;
- 2 Cobra jejunale voedingskatheter door de PEG;
- 3 Kimberly-Clark chirurgische jejunale voedingskatheter;
- 4 Kimberly-Clark laagprofiel jejunale voedingskatheters;
- 5 Kimberly-Clark conventionele jejunale voedingskatheters.

1 Cobra jejunale neussonde

Gastro-duodenaalkatheters worden veelal tijdelijk gebruikt, bijvoorbeeld bij patiënten op de intensive care. Bij de plaatsing wordt gebruik gemaakt van een scoop. Via de endoscoop wordt een voerdraad ingebracht, die vervolgens naar de maag en de dunne darm wordt geleid. De jejunale neussonde kan daarna over deze voerdraad worden ingebracht. Ook kan de katheter van 300 cm door de endoscoop worden opgevoerd en naar de dunne darm worden geleid.

2 Cobra jejunale voedingskatheter door de PEG

De Cobra jejunostomiekatheter van 9FR past door een 15FR PEGgi van Medi-Globe en de 15FR PEG van Fresenius.

3 Kimberly-Clark chirurgische jejunale voedingskatheter

Deze MIC jejunostomie voedingskatheter met enkel lumen (0301-serie) is ontwikkeld voor mensen die alleen jejunale voeding nodig hebben. De katheter wordt chirurgisch rechtstreeks in het jejunum geplaatst met behulp van de Witzel Tunneltechniek.

Hierdoor ligt de sonde stevig verankerd in de dunne darm en is de kans op lekkage minimaal. De grote binnendiameter van 9FR voorkomt verstopping.

Eigenschappen

- ✓ Gemaakt van veredeld siliconenmateriaal;
- ✓ Hechtbare vleugels die de sonde op haar plaats houden;
- ✓ Grote 9FR interne diameter;
- ✓ Radiopaque: contrastlijn voor zichtbaarheid onder röntgen.

4 Kimberly-Clark laagprofiel jejunale voedingskatheters

Er zijn twee jejunale voedingskatheters met een laag profiel: de 0230- en de 0270-serie. Deze MIC-KEY voedingskatheters zijn onzichtbaar onder kleding: ze liggen namelijk plat op de huid. Alleen tijdens het toedienen van voeding en medicatie wordt er een verlengslang aan gekoppeld. Deze zijn beschikbaar in verschillende soorten en lengtematen en passen altijd, ongeacht de diameter van de jejunale voedingskatheter. De 0270-katheter heeft een dubbel lumen, waardoor er geheveld kan worden op de maag.

5 Kimberly-Clark conventionele jejunale voedingskatheters

De 0200-, 0210- en de 0650-serie hebben een conventioneel systeem. Dit betekent dat de voedingskatheter een extern huidplaatje heeft dat tegen de buikwand wordt geschoven. De katheter past hierdoor altijd, ongeacht de lengte van de stoma. De MIC jejunale voedingskatheters van Kimberly-Clark zijn verkrijgbaar met een enkel en met een dubbel lumen, waardoor de maag geheveld kan worden.

Plaatsingsmethoden

Endoscopisch

De meeste jejunale voedingskatheters worden met behulp van een scoop geplaatst op de afdeling Endoscopie. Sommige MIC-PEG katheters (bijvoorbeeld uit de 0644-serie) kunnen direct via een PEG-methode endoscopisch in de dunne darm worden geplaatst.

PR/EG-methode

(radiologisch en endoscopisch)

De Kimberly-Clark jejunale voedingskatheters in de series 0200, 0230, 0270 en 0650 kunnen direct worden geplaatst met behulp van de PR/EG-introductieset. Er is een aparte folder verkrijgbaar over het percutaan plaatsen van deze MIC- en MIC-KEY jejunale voedingskatheters via de PR/EG-methode.






Kimberly-Clark laagprofiel jejunale voedingskatheters (zie 4)

Kimberly-Clark MIC-KEY jejunale voedingskatheter met enkel lumen (0230-serie)

Deze MIC-KEY jejunale voedingskatheter met enkel lumen is ontwikkeld voor mensen die alleen jejunale voeding nodig hebben. Met de katheter kan de maag worden geheveld. Dankzij de laagprofiel externe fixatie valt de katheter niet op onder kleding. De sonde kan op de juiste lengte worden afgeknipt. De katheter wordt geleverd met een speciaal adaptertje, dat het terugslagklepje in de MIC-KEY open houdt. Zo kan, bij plaatsing, een voeddraad door de voedingskatheter worden opgevoerd.

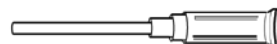

Eigenschappen

- ✓ Gemaakt van veredeld siliconenmateriaal; waarop verlengslangen uit de series 0221, 0222, 0223, 0224 en 0226
- ✓ Laag profiel;
- ✓ Met water vulbare interne fixatieballon; kunnen worden aangesloten;
- ✓ Proximale terugslagklep; ✓ Radiopaque contrastlijn voor zichtbaarheid onder röntgen;
- ✓ Afknipbare distale tip;
- ✓ Secur-Lock* verlengslangconnector; ✓ Verkrijgbaar in de maten 14 en 18 FR.

Kimberly-Clark MIC-KEY transgastrische jejunale voedingskatheter met dubbel lumen (0270-serie)


De MIC-KEY transgastrische jejunale voedingskatheter met laag profiel is onopvallend en gemakkelijk te verbergen onder kleding. De katheter heeft een dubbel lumen: dankzij de gescheiden jejunale en gastrische poorten kan worden gevoed op het jejunum, terwijl de maag wordt geheveld. De verschillende uitgangen bij de maag en in het jejunum verbeteren de doorstroming en minimaliseren het risico op verstopping. Het verzwaarde jejunale deel helpt de katheter op haar plaats te houden.



Eigenschappen

- ✓ Gemaakt van veredeld siliconenmateriaal; 0221, 0222, 0223, 0224 en 0226
- ✓ Laag profiel; kunnen worden aangesloten;
- ✓ Met water vulbare interne fixatieballon; ✓ Radiopaque contrastlijn voor zichtbaarheid onder röntgen;
- ✓ Proximale terugslagklep;
- ✓ Secur-Lock* verlengslangconnector; ✓ Verkrijgbaar in diverse lengtematen;
- waarop verlengslangen uit de series ✓ Verkrijgbaar in 16, 18 en 22 FR.

Verlengslangen voor MIC-KEY laagprofiel jejunale voedingskatheters

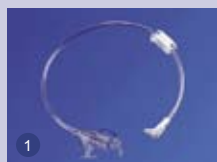

1 0221-12 / 0221-24 / 0222-02

2 0223-12 / 0223-24

3 0224-12 / 0224-24

4 0226-12 / 0226-24

Deze verlengslangen zijn te gebruiken met de MIC-KEY laagprofiel jejunale voedingskatheters uit de 0230- en de 0270-serie.

Kimberly-Clark conventionele jejunale voedingskatheters (zie 5)

Kimberly-Clark MIC jejunale voedingskatheter met enkel lumen (0200-serie)

De Kimberly-Clark MIC jejunale voedingskatheter is ontwikkeld voor mensen die alleen jejunale voeding nodig hebben. Door het enkele lumen is het hevelen van de maag of het toedienen van medicijnen op de maag niet mogelijk. Het distale uiteinde kan op elke gewenste lengte worden afgeknipt.



Eigenschappen

- ✓ Gemaakt van veredeld siliconenmateriaal;
- ✓ Met water vulbare interne fixatieballon;
- ✓ Secur-Lock* externe fixatie;
- ✓ Universele jejunale voedingspoort (-aansluiting);
- ✓ Distale tip kan op de gewenste lengte worden afgeknipt;
- ✓ Radiopaque contrastlijn voor zichtbaarheid onder röntgen.

Kimberly-Clark MIC gastro-enterale voedingskatheter met dubbel lumen (0210-serie)

De Kimberly-Clark MIC gastro-enterale voedingskatheter met dubbel lumen is een voorloper van de MIC transgastrische jejunale voedingskatheter (0650-serie). De katheter is ontwikkeld om enteraal te voeden op het jejunum (dunne darm) en tegelijkertijd de maag te kunnen hevelen. Vanwege het dubbele lumen is deze katheter niet beschikbaar in 12- en 14 FR. De katheter is met name geschikt voor patiënten (bijvoorbeeld kinderen) die een dunner jejunaal gedeelte nodig hebben dan dat van de MIC transgastrische jejunale voedingskatheter (0650-serie).



Eigenschappen

- ✓ Gemaakt van veredeld siliconenmateriaal;
- ✓ Met water vulbare interne fixatieballon;
- ✓ Secur-Lock* externe fixatie;
- ✓ Gastrische decompressiepoort;
- ✓ Eén jejunale voedingspoort;
- ✓ Radiopaque: contrastlijn voor zichtbaarheid onder röntgen.

Kimberly-Clark MIC transgastrische jejunale voedingskatheter met dubbel lumen (0650-serie)

Deze MIC transgastrische jejunale voedingskatheter van Kimberly-Clark heeft een dubbel lumen. Zo kan er enteraal op de dunne darm (het jejunum) worden gevoed en tegelijkertijd kan de maag worden geheveld. Medicatie kan zowel op de maag als op het jejunum worden toegediend. Het uiteinde heeft een koordje, zodat de katheter met behulp van een biopteur endoscopisch kan worden geplaatst. Sommige MDL-artsen hechten de voedingskatheter vast in de dunne darm.



Eigenschappen

- ✓ Gemaakt van veredeld siliconenmateriaal;
- ✓ Met water vulbare interne fixatieballon;
- ✓ Secur-Lock* externe fixatie;
- ✓ Universele jejunale voedingspoort (-aansluiting);
- ✓ Gastrische decompressiepoort;
- ✓ Verzwaarde jejunale tip;
- ✓ Radiopaque contrastlijn voor zichtbaarheid onder röntgen;
- ✓ Verkrijgbaar in 16, 18 en 22 FR;
- ✓ Verkrijgbaar in lengten van 15, 22, 30 en 45 cm vanaf de ballon.

Gespecialiseerd in enterale voedingssystemen

Cobra Medical levert een compleet pakket enterale voedingssystemen. Met deze MIC-voedingssystemen en de MIC-accessoires bieden wij een ruime variatie aan innovatieve producten voor het toedienen van voeding op de maag en het jejunum (dunne darm). Kimberly-Clark produceert de MIC-producten volgens de modernste fabricagetechnieken.

Scholing

Cobra Medical organiseert regelmatig scholings- en voorlichtingsbijeenkomsten. Voor informatie over ons scholingsprogramma kunt u contact met ons opnemen. Ook bent u van harte welkom op de congressen die wij in de verschillende regio's organiseren. Actuele informatie hierover vindt u op onze website www.cobramedical.com.

Eigenschappen jejunale voedingskatheters

	0230	0270	0200	0210	0650	0301	081391,09D**	7901191***
Laagprofiel systeem	✓	✓						
Enkele lumen	✓		✓			✓	✓	
Dubbel lumen*		✓		✓	✓			✓
Aanpasbare lengte	✓		✓					

* Met een dubbel lumen is hevelen van de maag mogelijk

** Cobra jejunale neussonde

*** Cobra jejunale voedingskatheter door de PEG

Postbus 5153
9700 GD Groningen
Nederland
tel. +31 (0)50 528 04 98
fax +31 (0)50 528 04 95
info@cobramedical.com
www.cobramedical.com

België
tel. +32 (0)70 66 05 70
fax +32 (0)70 66 05 72
info@cobramedical.be
www.cobramedical.be

